

RECOMENDACIONES DE USO DE ALINEADORES ESTHETIC ALIGNER



Esthetic Aligner



RECOMENDACIONES

Use los alineadores el mayor tiempo posible (mínimo 22 horas).

Realiza suaves ejercicios de masticación con los alineadores.

No alimente con los alineadores.

La inserción y extracción de los alineadores debe realizarse por detrás y de forma bilateral.

Los alineadores se pueden limpiar con un cepillo suave, agua fría y pasta de dientes.



PREGUNTAS FRECUENTES



•¿CUÁL ES LA FRECUENCIA IDEAL ENTRE LAS CONSULTAS?

Para que el tratamiento avance adecuadamente, es importante respetar el tiempo correcto entre citas, según su tipo de tratamiento:

-Tratamiento convencional:

Cambio de alineadores: El primer alineador de la serie se debe utilizar durante 10 días, mientras que el segundo alineador de la serie se debe utilizar durante 20 días.

Se deberán realizar nuevas consultas cada 30 días.

-Tratamiento periodontal:

Cambio de alineadores: El primer alineador de la serie se debe utilizar durante 15 días, mientras que el segundo alineador de la serie se debe utilizar durante 15 días.

Se deberán realizar nuevas consultas cada 30 días.

•PERDÍ MI ALINEADOR, Y AHORA QUÉ?

Si ha perdido sus alineadores, no se preocupe. Identifique su tipo de tratamiento a continuación y vea cómo proceder:



Tratamiento convencional:

Si pierde su alineador de 10 días, colóquelo con anticipación 20 días.

Si pierde el alineador de 20 días, devuelva el alineador de 10 días.

Si pierde ambos alineadores, anticipe su cita de regreso.

Tratamiento periodontal:

Si pierde el primer alineador de 15 días, coloque el segundo alineador de 15 días con anticipación.

Si pierde el segundo alineador de 15 días, devuelva el primero Alineador de 15 días.

Si pierde ambos alineadores, anticipe su cita de regreso.



PREGUNTAS FRECUENTES


• MI ALINEADOR ROZA MI BOCA. ¿QUÉ DEBO HACER?

Si el alineador roza la lengua y/o los labios, se pueden realizar pequeños ajustes con unas tijeras, preferiblemente curvas, o una lima de uñas. Haga ajustes suaves y pruebe.



• ¿QUÉ DEBO HACER SI MI ALINEADOR SE AGRIETA?

Las grietas y perforaciones en los alineadores son poco comunes, pero pueden ocurrir y, a menos que sean completas, no impiden la efectividad del alineador.

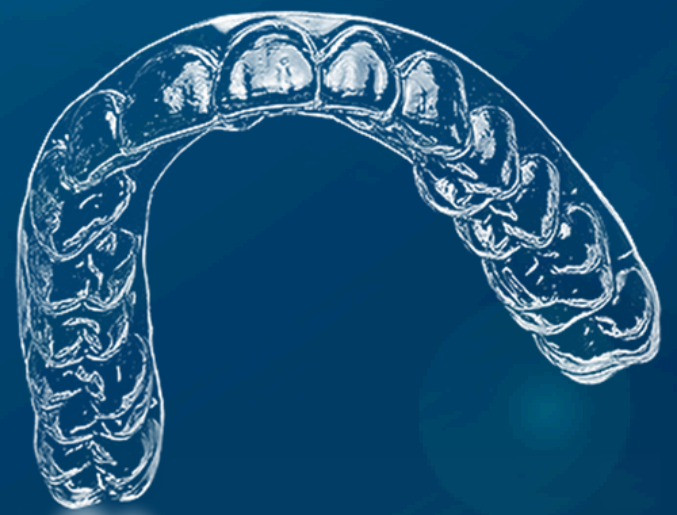

• ¿CÓMO PUEDO LIMPIAR MIS ALINEADORES?

Para mantener tus alineadores siempre limpios, puedes cepillarlos con un poco de pasta de dientes o detergente neutro y enjuagar con agua fría.



PREGUNTAS FRECUENTES

•¿CÓMO CUIDAR TUS ALINEADORES?

Los alineadores Esthetic Aligner son resistentes y producido con placas PET-G de última generación. Pero para mantener la integridad de tu alineador, debes tener algunos cuidados:



- ✗ No coloque alineadores en antisépticos que contengan alcohol.
- ✓ La colocación y extracción deben realizarse bilateralmente.
- ✓ Cuando no esté en la boca, mantenga los alineadores en el estuche Esthetic Aligner.

•PUEDO REALIZAR OTROS TRATAMIENTOS JUNTO CON LOS ALINEADORES?

Sí. Tus alineadores Esthetic Aligner son Individualizado y producido por etapas, permite realizar cualquier tratamiento dental en continuidad con su tratamiento de ortodoncia. Los alineadores también se pueden utilizar para blanquear los dientes.



PREGUNTAS FRECUENTES

• ¿SE PUEDE REALIZAR EL TRATAMIENTO CON ALINEADORES EN NIÑOS?



¡Sí! El tratamiento con Esthetic Aligner está indicado para cualquier grupo de edad, incluida la dentición mixta. Además de las ventajas de un tratamiento más cómodo, estético y sin restricciones dietéticas, para las personas de baja estatura el tiempo que llevan los alineadores durante el día es menor, lo que facilita la adaptación al tratamiento.

• TERMINÉ MI TRATAMIENTO, ¿Y AHORA QUÉ?

Al finalizar el tratamiento con alineadores Esthetic Aligner, es muy importante utilizar tus retenedores diariamente. Se deben programar nuevas citas para seguimiento. Los cambios de retenedor serán necesarios y recomendados de vez en cuando.

Varias razones hacen que los dientes se vuelvan moverse después de completar el tratamiento de ortodoncia. El principal es el uso inapropiado de restricciones. En este caso, el uso de alineadores en el tratamiento de recurrencias es una excelente alternativa, proporcionando corrección dental con mucho más confort, estética y eficacia.

