

RECOMENDAÇÕES DE USO ALINHADORES ESTHETIC ALIGNER



EA

Esthetic Aligner



RECOMENDAÇÕES

Utilize os alinhadores o máximo de tempo possível (mínimo de 22 horas).

Faça exercícios suaves de mastigação com os alinhadores.

Não se alimente com os alinhadores.

A colocação e retirada dos alinhadores deve ser feita pela parte posterior e bilateralmente.

A higiene dos alinhadores pode ser feita com escova macia, água fria e creme dental.



DÚVIDAS FREQUENTES



•QUAL A FREQUÊNCIA IDEAL ENTRE AS CONSULTAS?

Para que o tratamento evolua de forma adequada, é importante respeitar o tempo correto entre as consultas, de acordo com o seu tipo de tratamento:

-Tratamento convencional:

Troca dos alinhadores: Primeiro alinhador da série deve ser utilizado por 10 dias, já o segundo alinhador da série deve ser utilizado por 20 dias.

Novas consultas devem ser realizadas a cada 30 dias.

-Tratamento periodontal:

Troca dos alinhadores: Primeiro alinhador da série deve ser utilizado por 15 dias, já o segundo alinhador da série deve ser utilizado por 15 dias.

Novas consultas devem ser realizadas a cada 30 dias.

•PERDI MEU ALINHADOR E AGORA?

Se você perdeu seus alinhadores, não se preocupe. Identifique abaixo o seu tipo de tratamento e veja como proceder:



Tratamento convencional:

Em caso de perda do alinhador de 10 dias antecipe a colocação do alinhador de 20 dias.

Em caso de perda do alinhador de 20 dias retorne ao alinhador de 10 dias.

Em caso de perda dos dois alinhadores antecipe sua consulta de retorno.

Tratamento periodontal:

Em caso de perda do primeiro alinhador de 15 dias antecipe a colocação do segundo alinhador de 15 dias.

Em caso de perda do segundo alinhador de 15 dias retorne ao primeiro alinhador de 15 dias.

Em caso de perda dos dois alinhadores antecipe sua consulta de retorno.



DÚVIDAS FREQUENTES


• MEU ALINHADOR ESTÁ RASPANDO NA BOCA. O QUE DEVO FAZER?

Caso o alinhador esteja raspando na língua e/ou lábios, pequenos ajustes podem ser realizados com uma tesoura, de preferência curva, ou lixa de unha. Faça ajustes suaves e vá testando.



• O QUE FAZER SE MEU ALINHADOR TRINCAR?

Trincas e perfurações nos alinhadores são incomuns, mas podem ocorrer e, a não ser que sejam completas não inviabilizam a efetividade do alinhador.

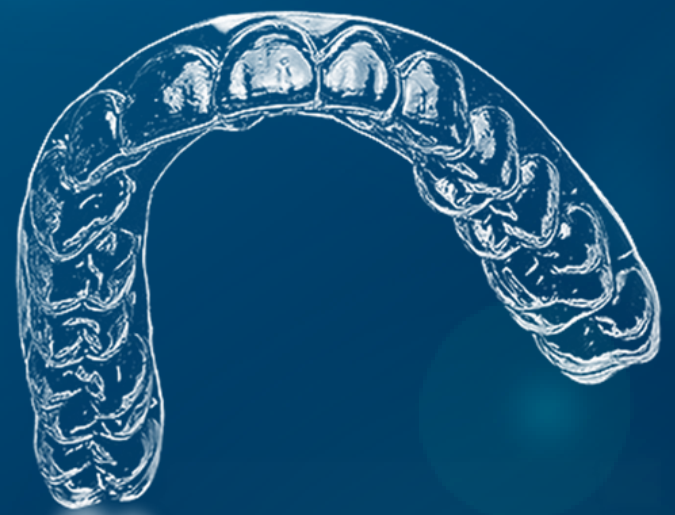

• COMO POSSO REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO DOS MEUS ALINHADORES?

Para ter os seus alinhadores sempre higienizados, você pode escová-los com um pouco de pasta de dente ou detergente neutro e enxaguar com água fria.



DÚVIDAS FREQUENTES

• COMO CUIDAR DOS SEUS ALINHADORES?

Os alinhadores Esthetic Aligner são resistentes e produzidos com placas de PET-G de última geração. Mas para manter a integridade do seu alinhador deve-se tomar alguns cuidados:



- ✘ Não coloque os alinhadores em antissépticos que contenham álcool
- ✔ A colocação e a retirada devem ser feitas de forma bilateral
- ✔ Quando não estiverem na boca, mantenha os alinhadores no estojo Esthetic Aligner

• POSSO REALIZAR OUTROS TRATAMENTOS EM CONJUNTO COM OS ALINHADORES?

Sim. Os seus alinhadores Esthetic Aligner são individualizados e produzidos por etapas, isto permite a realização de qualquer tratamento dentário em continuidade ao seu tratamento ortodôntico. Seus alinhadores também podem ser utilizados para realizar o clareamento dental.



DÚVIDAS FREQUENTES

• O TRATAMENTO COM ALINHADORES PODE SER REALIZADO EM CRIANÇAS?



Sim! O tratamento com Esthetic Aligner é indicado para qualquer faixa etária, inclusive na dentição mista. Além das vantagens de um tratamento mais confortável, estético e sem restrições alimentares, para os baixinhos o tempo de utilização dos alinhadores durante o dia é menor, o que facilita a adaptação com o tratamento.

• FINALIZEI MEU TRATAMENTO E AGORA?

Ao final do tratamento com os alinhadores da Esthetic Aligner, é muito importante utilizar as contenções diariamente. Novas consultas devem ser agendadas para acompanhamento. Trocas das contenções serão necessárias e recomendadas de tempos em tempos.

Diversos motivos levam os dentes a se movimentarem após a conclusão do tratamento ortodôntico. O principal deles é o uso inadequado das contenções. Neste caso, o uso dos alinhadores no tratamento das recidivas é uma excelente alternativa, proporcionando a correção dos dentes com muito mais conforto, estética e eficácia.

